



2301

この二次元コードは、この説明書の識別用のものです。

CITIZEN

アプリ・通信説明書

シチズン電子体温計CTEB7XXCシリーズ



スマートフォンに専用アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」をインストールすると、測定結果をスマートフォンから確認できます。

- 「Appleヘルスケア」アプリと連携し、データを記録できます(iOS)
- 体温のグラフ表示ができます(Android、iOS)

●●●スマートフォンと接続する●●●

1. スマートフォンのBluetooth®を有効(ON)にする

- ① スマートフォンの「設定」を開く
- ② Bluetooth®を有効(ON)にする
※接続するデバイスは、この画面では選ばないでください。
※スマートフォンの操作方法など詳細に関しては、スマートフォンの取扱説明書やヘルプで確認してください。

2. スマートフォンに専用アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」をインストールする



- ① 以下のURLまたは二次元コードにアクセスするか、あるいはApp StoreまたはGoogle Playで「シチズンヘルスケア 健康予約」を検索する
対応OSについては、以下のURLまたは二次元コードを参照してください。
• <https://www.citizen-systems.co.jp/health/app/index.html>



シチズンヘルスケア 健康予約 🔍



- ② 「シチズンヘルスケア 健康予約」をインストールする
※「シチズンヘルスケア 健康予約」は無料アプリです。
※本アプリのダウンロードおよび本サービスの利用に伴って生じる通信費用は、ユーザの負担となります。
※アプリおよびそれに関連するサービスは予告なく仕様変更することがあります。

3. アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」を起動して機器(体温計)を登録する



はじめて起動したときは、利用規約が表示されます。

- ① アプリ画面に下のどちらかが表示されたら、「はい」をタップする

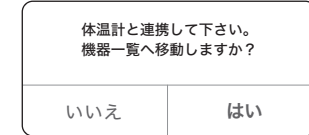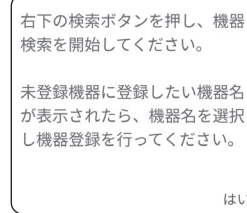


- ② アプリ画面右下の 🔍 をタップする
機器検索が始まります。


未登録機器 🔍

検索中は丸がくるくると回ります。
※OSによって検索中の表現は異なる場合があります。

- ③ 電源が切れた状態の機器の電源ボタンを2秒以上押し続ける
電源ボタンを押し続けると、on表示、oFF表示が交互に切り替わります。

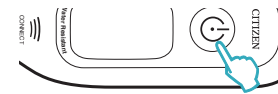

- ④ on表示のときに電源ボタンを離す
機器表示部のBluetooth®マーク が点灯し、転送機能がONに設定されます。
- ⑤ 測定準備完了画面になったら、電源ボタンを押す
機器表示部が点滅します。
※購入後、初めて使用するときに表示される前回値(メモリー)は製品検査時の値で、異常値ではありません。
- ⑥ アプリ画面の「未登録機器」欄の「CTEB7XXCシリーズ」を選ぶ
右のような確認画面が表示されたら、「はい」を選んでください。
• Bluetooth®ペアリング要求ダイアログが出てきた場合: 「ペアリング」もしくは「ペア設定をする」を選んでください。
• Bluetooth®ペアリング要求ダイアログが出てこない場合: スマートフォンの通知欄を確認し、ペアリングを許可してください。

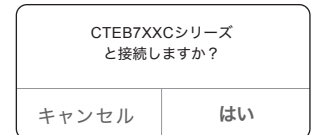

- ⑦ 機器表示部に「Con」と表示され、登録が完了する
一定時間経過後に機器の電源が切れます。
※一度ペアリングした機器の接続情報がスマートフォンに残っている場合、「Con」は表示されません。
- ※通信エラーが発生すると、機器の操作ができなくなる場合があります。その場合は、機器の電池を入れ直し、操作をやり直してください。

●●●測定データを転送する●●●

◆ 測定直後のデータを転送する

※機器のスマートフォンへの転送機能が有効(ON)の状態で行ってください。(機器の取扱説明書を参照してください。)

- ① アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」を起動し、サマリー画面または体温測定値一覧画面を表示する



- ② 機器での測定が完了したら、機器の電源ボタンを押す
測定データがスマートフォンに転送されます。

◆ メモリーデータを転送する

- ① アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」を起動し、サマリー画面または体温測定値一覧画面を表示する。

- ② メモリーを転送する

電源ボタンを押して電源ONし、測定せずに電源OFFしてください。

※アプリが起動していないと、データは転送されません。

※ペアリングをする前に測定したデータの日時情報は正しく表示されません。必ずペアリング後に測定し、データを転送してください。

※アプリの操作方法など詳細に関しては、アプリのヘルプで確認してください。

●●「Appleヘルスケア」アプリと連携する(iOSのみ)●●

1. アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」のサイドメニュー(≡)をタップし、「アプリ連携」を選ぶ

2. 「Appleヘルスケア」を有効(ON)にする



3. 「Appleヘルスケア」の同意画面が表示されるので、「すべてのカテゴリをオン」をタップし、「許可」をタップする

※「すべてのカテゴリをオン」しないと正常に連携しない可能性があります。

体温の測定データを連携することができます。

※初めの同意画面で「許可しない」をタップした場合、「シチズンヘルスケア 健康予約」から「Appleヘルスケア」に接続することができなくなります。その場合の詳細は、アプリのヘルプで確認してください。

CITIZEN、健康予約はシチズン時計株式会社の登録商標です。

Apple、Appleロゴは、Apple Inc.が米国およびその他の国で所有する商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Android、Google PlayはGoogle LLCの登録商標です。

IOS®はCisco in the U.S.が米国およびその他の国で所有する商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

シチズン・システムズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。