

CITIZEN

保証書付

取扱説明書

シチズン手首式血圧計

CHWHシリーズ

CHWH903

CHWH803



- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

1.本体付属品

以下の物がそろっているかご確認ください。

- 本体
- CHWH903(ホワイト)
- 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)
- CHWH803(ブラック)
- 取扱説明書/保証書
- 医療機器添付文書/EMC技術資料
- アプリ・通信説明書

収納ケースの開けかた

収納ケースのツメに親指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

2.安全上のお願

ご使用前に、この「安全上のお願」をよくお読みください。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
- 注意** 人が傷害を負ったり、物的損害*の発生する可能性が想定される場合
- 強制** 必ず実行していただく「強制」内容です。
- 禁止** してはいけない「禁止」内容です。

警告

- 測定結果の自己判断、および治療は危険です。必ず医師の指導に従ってください。
- 自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。
- 心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。
- 体調不良をおこすおそれがあります。
- 電池の液が目に入った、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- けがなどの原因になります。
- 航空機内や病院など、無線機器の使用を制限された区域では使用しないでください。
- 電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。
- 分解・修理・改造をしないでください。
- 事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。


注意

- お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
- 事故やけがの原因になります。
- 長時間連続して測定しないでください。
- うっ血、はれなどの原因になります。
- 血圧測定以外に使用しないでください。
- 事故やけがの原因になります。
- 血圧測定中に血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
- 誤作動をおこすおそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。
- 電池の+ -の向きを間違えないようにしてください。
- 漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。
- 本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
- 故障の原因になります。

3.測定時の注意点

- 測定前に5～6回深呼吸をし、リラックスして測定してください。(緊張時や、精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。)
- 睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
- 飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
- 尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
- 20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
- コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
- 連続して測定をおこなわないでください。手首がうっ血して正しい値が得られません。必ず間隔(1分以上)をあけてから測定してください。
- 正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしないでください。
- 血圧は長期のデータを見るのが大切です。お薬(血圧を下げる薬等)を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
- 測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断して医師の指導を受けてください。

4.各部のなまえ

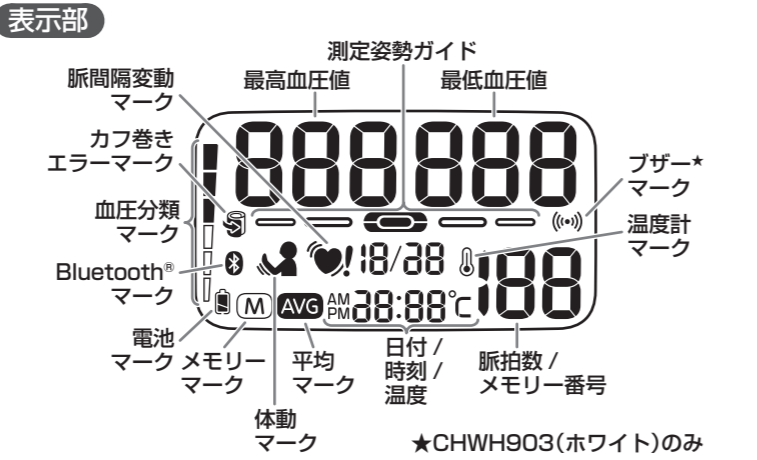

5.電池を入れましょう

- 電池カバーを開けます**
電池カバーを指で開きます。
- 電池を入れます**
電池カバーを◀▶方向にずらすとカバーが跳ね上がります。
- 電池カバーを閉めます**
電池カバーを押さながら◀▶とは反対方向にずらします。「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 時計を合わせます**
電池を入れると、「西暦年」の表示が点滅します。「6.時計を合わせましょう」の手順①から順に設定してください。
※電池交換の場合は、電池を交換してもメモリーは保持されています。
※電池を交換した後は、時計、スマートフォンへの転送機能、プザー音量*の設定を再度おこなってください。
★CHWH903(ホワイト)のみ

- またはマークが表示されたら、2本同時に電池を交換してください。(充電電池をご使用の場合は充電してください。)
- アルカリ電池、ニッケル水素充電電池*を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ電池、ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。
- 付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
- ニッケル水素充電電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
- ※ニッケル水素充電電池は、エネルギーまたは充電式エネルギアをご使用ください。

6.時計を合わせましょう

本製品は測定結果を、日付・時刻とともに記録することができます。毎日同時刻に測定するなど、日々の健康管理にお役立てください。

- 時計合わせの手順
①西暦年→②月→③日→④時→⑤分→⑥12/24時間表示
[START/STOP]を押すたびに時計設定箇所が点滅します。

■時計を合わせましょう
例として「2020年6月10日午前7時30分」に時計を合わせる手順を説明します。

電池を入れると、時計合わせの「西暦年」が点滅しますので、以下の手順①から順次、設定してください。

- 「M」を押して「西暦年」を合わせます**
Mを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。設定可能な上限値を超えると設定可能な下限値にもどります。数字を合わせたら、[START/STOP]を押してください。「西暦年」が確定し、「月」が点滅します。
- 「M」を押して「月」を合わせます**
Mを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。数字を合わせたら、[START/STOP]を押してください。「月」が確定し、「日」が点滅します。
- 「M」を押して「日」を合わせます**
Mを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。数字を合わせたら、[START/STOP]を押してください。「日」が確定し、「時」が点滅します。
- 「M」を押して「時」を合わせます**
Mを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。数字を合わせたら、[START/STOP]を押してください。「時」が確定し、「分」が点滅します。
- 「M」を押して「分」を合わせます**
Mを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。数字を合わせたら時報などを確認して、[START/STOP]を押してください。「分」が確定し、「12H」または「24H」が点滅します。
- 「M」を押して「12/24」時間表示を選びます**
Mを押すたびに、「12H」と「24H」が切り替ります。
●例：午後1時の場合……12H→PM1:00 24H→13:00
お好みで合わせたら、[START/STOP]を押してください。
「12/24」時間表示が確定し、時計設定が終了します。設定した日付と時刻を表示したあと、電源が切れ表示が消えます。

■時計を修正する場合は
設定を最後まで終了させた状態で、「時計設定」スイッチを3秒以上長押ししてください。
画面に「西暦年」が点滅しますので、「6.時計を合わせましょう」の手順①から操作してください。


7.スマートフォンへの転送機能・プザー音量*を設定しましょう

スマートフォンへの転送機能(有効/無効)、プザー音量(音量大/音量小/音なし)*が設定できます。転送機能が有効の場合はBluetooth®マークが、プザー音量設定した場合(音量大/音量小)*はプザーマーク(音なし)が、測定中および測定結果呼び出し時に点灯します。
★CHWH903(ホワイト)のみ

本製品は、測定結果をスマートフォンに転送して記録できます。詳しくは、「アプリ・通信説明書」を参照してください。


- 「時計設定」スイッチを1回押します**
※短く1回押ししてください。3秒以上長押しすると時計合せモード(「6.時計を合わせましょう」参照)になります。

2 「M」を押してスマートフォンへの転送機能の有効(ON)/無効(OFF)を選びます

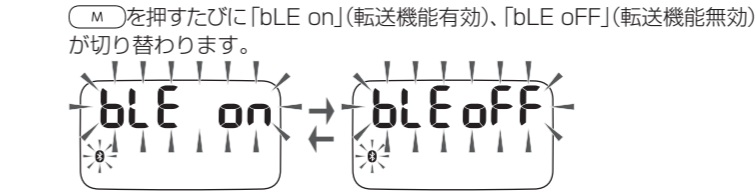

- お好みで合わせたら、[START/STOP]を押してください。
- CHWH903(ホワイト)の場合：
スマートフォンへの転送機能の有効/無効が確定し、プザー音量「on Hi」、「on Lo」または「off」が点滅します。手順③へ進んでください。
- CHWH803(ブラック)の場合：
スマートフォンへの転送機能の有効/無効が確定し、電源が切れ表示が消えます。


3 CHWH903(ホワイト)の場合：「M」を押してプザー音量を選びます

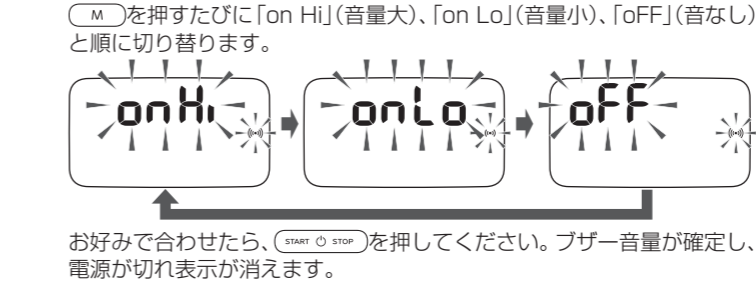

8.手首カフを巻きましょう

腕時計などを外しましょう。上着のそでをまくり上げるときは、腕が圧迫されないようにしてください。手首周囲が13.5cm未満の方、21.5cmを超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

- 手首カフを開きます**
手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。
- 位置を確認し、手首カフを左手首にかぶせます**
カフの端が長いときは、折り返して固定します。
- 手首カフをぴったり巻きつけます**
手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

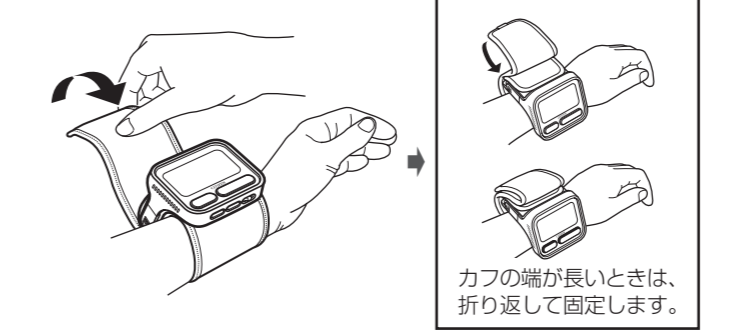

手首のすじから1～2cmのところに手首カフの縁を合わせ、表示部を右図のようにしてください。



右手首でも測定できます


血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。



9.正しい姿勢を確認しましょう

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測ることが大切です。

- 姿勢を整えましょう**
背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。
- 手の親指側を上に向けて、力を抜きましょう**
- 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう**
- 脚を組まないようにしましょう**

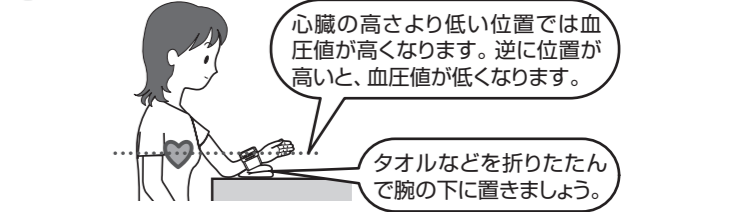

正しく測定するためには


- ✗ 手首カフがゆるまないようにぴったり巻く。
- ✗ 手を強く握りしめない。
- ✗ 手首を曲げない。
- ✗ 本体の位置をずらさない。
- ✗ 測定中に動いたり話したりしない。

寝た姿勢でも測定できます


血圧計と心臓を同じ高さにしてください。そのほかのポイントについては、「3.測定時の注意点」を参考にしてください。

測定姿勢ガイドの設定をしましょう


測定姿勢ガイドとは、前回測定時の姿勢(本体の角度)を記憶して、次回も同じ姿勢で測定できるようにガイドする機能です。個人で使用する場合にこの機能をお使いいただくと、安定した測定姿勢を得ることができます。

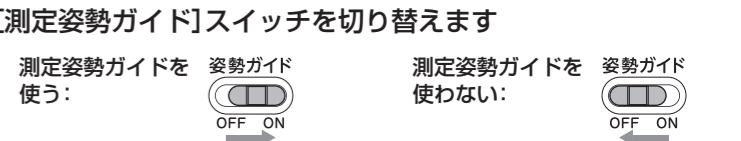

●測定姿勢ガイドを使う場合：
はじめて測定する際に、正しい測定姿勢を記憶させます。

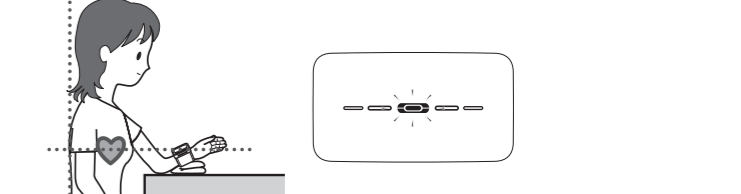

2回目以降に測定する際には、前回測定時の姿勢と本体の角度が異なる場合、中央以外の一部分が点滅します。

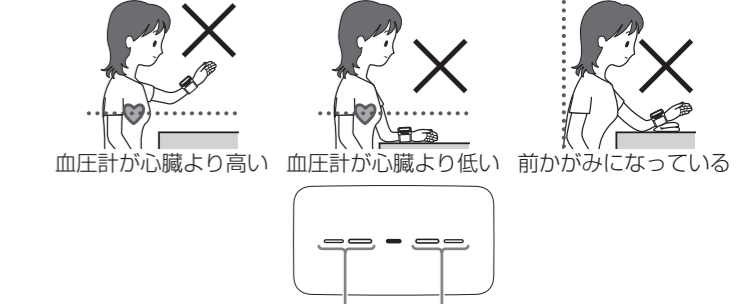

左右4か所のうち、一部分が点滅します

- ※この機能は前回測定時の姿勢を記憶するものです。はじめて測定する際に正しくない姿勢が記憶されてしまった場合は、2回目以降に正しい姿勢で測定し直してください。
- ※1台の血圧計を複数人でお使いになる場合などは、測定姿勢ガイドは正しくガイドできません。そのような場合は「OFF」にしてください。
- ※電池を交換した場合は、前回測定時の姿勢の記憶がリセットされます。

10.測定しましょう

スマートフォンへの転送機能が有効 (ON) の場合、血圧を測定するときに専用アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」を起動しましょう。測定が完了し、「START/STOP」を押すと測定データが自動的にスマートフォンに転送されます。詳しくは、「アプリ・通信説明書」を参照してください。

11.スタート/ストップを押します


※プザーマーク(☺)はCHWH903(ホワイト)のみです。



- [測定姿勢ガイド]スイッチが「ON」の場合：温度表示後に測定姿勢ガイドが表示されます。手順②へ進んでください。

- [測定姿勢ガイド]スイッチが「OFF」の場合：手順③へ進んでください。

12.（測定姿勢ガイド）スイッチが「ON」の場合は測定姿勢ガイドを確認して、姿勢を整えます

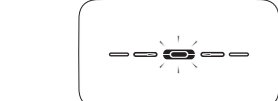

本体の角度は適正です

本体の角度が適正になると、自動的に測定を開始します。※本体の角度が適正ではない場合でも、一定時間経過すると自動的に測定を開始します。

13.測定を開始します



- ・脈拍を感じると測定マーク♥が点滅します。

- CHWH903(ホワイト)の場合：

プザー音量が、「on Hi」または「on Lo」のときは、測定中にプザーマーク(☺)が点灯し、脈拍に合わせてプザー音が鳴ります。

※測定を止めるときは、「START/STOP」を押してください。「START/STOP」を押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。




保証規定

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
 - 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（電池）などの交換。
- ※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様の負担となります。
- ・保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 - ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

保証書	CITIZEN
本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後1年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。	
商品コード： CHWH903 CHWH803	お買い上げ日： 年 月 日
ご住所：	
お名前：	
販売店名および住所：	
シチズン・システムズ株式会社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 0120-88-6295 （お客様相談室） 受付時間：10～17時 月～金（祝祭日、年末年始を除く） 通話料金は無料です。 E-mail: support@systems.citizen.co.jp http://www.citizen-systems.co.jp	
CITIZENはシチズン時計株式会社の登録商標です。	
検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。	1901

4.測定結果が表示されます

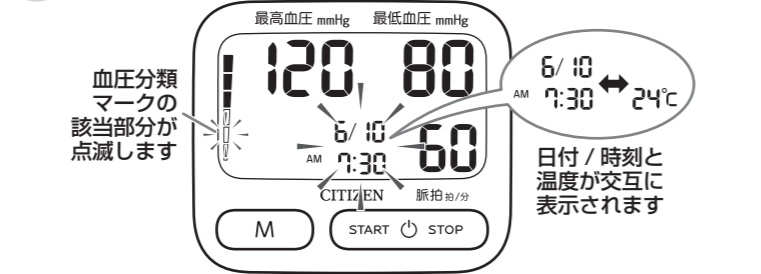

- ※測定結果は自動的に記録されます。
- ※血圧分類マークは、「12.マークについて」を参照してください。
- ※測定結果にマーク「☺♥!」が表示された場合は、「12.マークについて」を参照してください。

5.測定後、スタート/ストップを押して電源を切ります

- スマートフォンへの転送機能が有効 (ON) の場合：転送が始まります。
 - ・Bluetooth®マーク☺が点滅します。転送処理が終了したら電源が切れます。※転送が始まったあとに再度「START/STOP」を押すと、転送が中止され電源が切れます。※測定後スイッチを押し忘れても、約5分後に自動的に電源が切れます。

11.測定結果を呼び出しましょう

60回分の測定結果を記録できます。平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。


12.Mを1回押します



- AVGが表示され、最新3回分の平均値を示します。※3回以上の測定結果（体動マーク表示の測定結果は除く）がなければ、平均値は表示されません。
- ※メモリーがない場合は測定結果は表示されません。

13.さらにMを押すと過去の測定結果を見ることができます

- Mを押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。
- Mを押し続けると過去の測定結果を早送りできます。

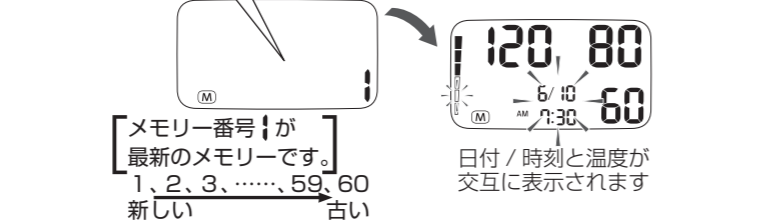

- CHWH903(ホワイト)の場合：使用温度範囲(10℃～40℃)外での測定や、測定直前に温度が急変したときの測定結果のメモリーは、温度計マーク🌡が点滅します。※「START/STOP」を押して測定結果の呼び出しを終了します。

ひとつのメモリーを消去したい場合

消去したい測定結果を表示してから、「[時計設定]」スイッチを4秒以上長押しして消去します。消去が完了すると、「CL」が点灯しますので、「[時計設定]」スイッチを離してください。メモリー消去中は電池を取り出さないでください。


すべてのメモリーを消去したい場合

すべてのメモリーを消去したいときは、測定結果を表示してから、Mを押した状態のまま、「START/STOP」を4秒以上長押しして消去します。消去が完了すると、「ALL CL」が点灯しますので、それぞれのスイッチを離してください。メモリー消去中は電池を取り出さないでください。

12.マークについて

血圧分類マークについて

WHO(世界保健機関)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類でどの領域にあるかを、6段階の血圧分類マークでお知らせします。

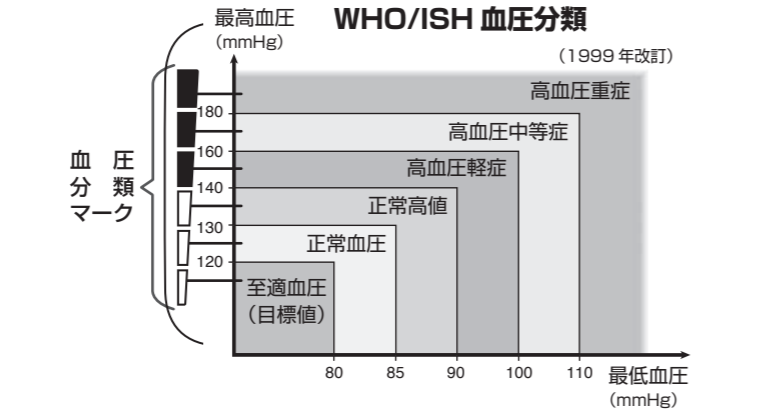

カフ巻きエラーマークについて

- ☹ 「カフ巻きエラーマーク」は、手首カフの巻き方がゆるい場合に表示されます。

- ・「カフ巻きエラーマーク」が表示された場合は手首カフをいったん外し、ぴったり巻きなおして再測定してください。

体動マークについて

- ☺ 「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出した場合に表示されます。

- ・「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

脈間隔変動マークについて

- ♥! 「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

- ・測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

<p>「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。</p>
--

温度計マークについて

- 🌡 「温度計マーク」は気温表示時に表示されます。CHWH903(ホワイト)は、使用温度範囲(10℃～40℃)外で測定した場合や、測定直前に気温が急変した場合に「温度計マーク」が点滅します。
- ・使用温度範囲外や、測定直前に気温が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、20℃前後の室温で再測定することをおすすめします。

13.保管とお手入れのしかた

- 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。また、水洗いもしないでください。故障の原因になります。

- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。電池からの液漏れにより、故障することがあります。

- 本体や手首カフをアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでください。材質を傷めるおそれがあります。

- 手首カフを無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。加圧不良の原因になります。

- 本体や手首カフがひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

- 本体側面のスリット穴からゴミや洗剤、水などが入らないように注意してください。

- 血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

14.血圧Q&A

Q 病院で測ってもらう血圧値と、家で測る血圧値がちがうのはなぜですか？

A 病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも10～20mmHgほど高くなる場合があります。家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

Q 測るたびに血圧値が違いますがなぜですか？

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。

- ・季節、気温
- ・体のリズム、体調、姿勢、運動
- ・精神状態、ストレス

ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

Q 家庭で血圧を測る意味は？

A 家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果をもとに、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

Q 上腕式血圧計の測定値とかなり違いますがなぜですか？

手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢（心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす）で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導に従ってください。
※手首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが10cm異なると血圧値は約8mmHg変化します。








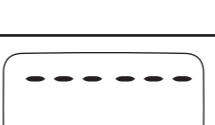
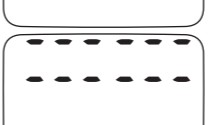
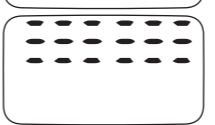
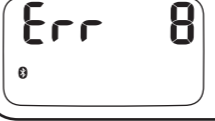
15.故障かな？と思ったら

修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

こんなとき	確認するところ	直しかた
START/STOP を押しても何も表示しない	電池が消耗していませんか	新しい電池と交換してください
	電池の☺➡の向きが間違っていますか	電池を正しい向きに入れなおしてください
測定できない	♥マークが点灯しましたか	手首カフを正しく巻きなおしてください
	手首カフを正しく巻いていますか	
	測定中は安静にしていましたか	安静にしよう一度測定してください
	脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります	

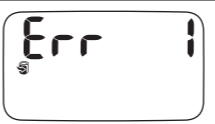故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にお問い合わせください。	受付時間：10～17時 月～金（祝祭日、年末年始を除く）
シチズン・システムズ株式会社 お客様相談室	0120-88-6295 通話料金は無料です。
E-mail:support@systems.citizen.co.jp	http://www.citizen-systems.co.jp

16.エラー表示について

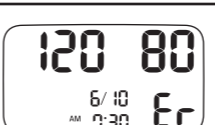エラー表示	原因	対処
	手首カフの巻きかたがゆるすぎます。	手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。（「8.手首カフを巻きましょう」参照）
	手首カフが正しく巻かれていないため、脈を検出できません。	
	センサーに圧力がかかり過ぎたため、測定できません。	
	281mmHg 以上加圧した。	測定中、自動的に圧力が下がらない場合には、「START/STOP」を押して測定を中止して、手首カフを外してください。
	乾電池が消耗しています。	2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。ニッケル水素充電電池を使用している場合には、充電してください。
	脈拍数が測定範囲外（39拍/分以下、または181拍/分以上）でした。	手首カフを巻きなおし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。（脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。）
	室温が0℃未満、もしくは51℃以上の環境で測定しています。	使用温度範囲(10℃～40℃)外で測定すると正しく測定できないことがありますので、20℃前後の室温で再測定することをおすすめします。
	本体が正常に作動していません。	お買い上げの販売店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。
		
		
		

17.電波法について

- ・本製品には、電波法の2.4GHz帯小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備が内蔵されています。

 ㊞006-000373



- ・内蔵されている無線設備の分解・修理・改造をしないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
- ・本製品は日本国内においてのみ使用できます。海外で使用すると、その国の電波法に抵触するおそれがあります。

18.電波干渉について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、ならびに免許を要するアマチュア無線局(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、本製品の運用(電波の発射)を停止してください。
- その他、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室にお問い合わせください。


19.製品仕様

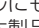販 売 名	シチズン手首式血圧計 CHWHシリーズ	
商 品 コ ー ド	CHWH903(ホワイト) CHWH803(ブラック)	
測 定 方 式	オシロメトリック法	
表 示	デジタル表示方式	
装 着 部	手首カフ	
手 首 周 長	13.5～21.5cm(測定可能手首周長範囲)	
測 定 範 囲	圧力:0～280mmHg、目量:1mmHg 脈拍:40～180拍/分	
測 定 精 度	圧力:±3mmHg 脈拍:読み取り数値の±5%	
時 計	月差±30秒(25℃にて)	
加 圧	ポンプによる自動加圧	
排 気	電磁弁による自動排気	
通 信 方 式	Bluetooth® low energy Ver. 4.1	
定格および電源	DC3V≡(≡ 直流) 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本	
電池使用回数	単4形アルカリ乾電池 約400回 (1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)	
使用温湿度	10℃～40℃/15%～85%RH	
保存温湿度	-20℃～60℃/10%～95%RH	
使用気圧範囲	700hPa～1060hPa	
メ モ リ ー	60回分	
電 撃 保 護	内部電源機器   BF形装着部)	
寸 法	約70(幅)×60(高さ)×85(奥行)mm(手首カフ含まず)	
質 量	約135g(電池含まず)	
付 属 品	単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、アプリ・通信説明書、収納ケース	

※本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※本製品はEMC規格IEC60601-1-2:2014に適合しています。EMC適合

※本製品はJIS規格(JIS T 1115:2018)に適合しています。
※本製品の臨床性能試験は、ISO(国際標準化機構)81060-2:2013の要求にもとづいて実施しております。
※本製品は不特定多数の被験者が対象となる医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。

「eneloop®」(エネループ)はパナソニックグループの登録商標です。
「EVOLTA」(エボルタ)はパナソニック株式会社の登録商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シチズン・システムズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

 本製品は湿気が多いところや水のかかるところで使用しないでください。
医療機器認証番号:301ADBZX00020000(管理医療機器)

製造販売元

シチズン・システムズ株式会社