

取扱説明書

シチズン手首式血圧計

CHWL350



- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。


1. 本体付属品

以下の物がそろっているかご確認ください。

- 本体** 表示部の透明シールをはがしてお使いください。
- 収納ケース**
- 単4形アルカリ乾電池 2本 (モニター用)**
- 取扱説明書/保証書/EMC技術資料**
- 医療機器添付文書**

収納ケースの開け方

収納ケースのツメに親指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

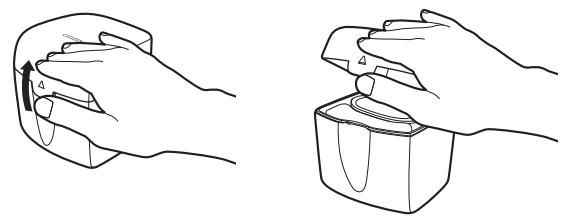

2. 安全上のお願い

ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警 告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合**注 意** 人が傷害を負ったり、物的損害*の発生する可能性が想定される場合

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

3. 警 告

測定結果の自己判断、および治療は危険です。 必ず医師の指導に従ってください。

→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

→体調不良をおこすおそれがあります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

→けがなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。 →事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

4. 注 意

- お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。** →事故やけがの原因になります。
- 長時間連続して測定しないでください。** →うっ血、はれなどの原因になります。
- 血圧測定以外に使用しないでください。** →事故やけがの原因になります。
- 血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。** →誤作動をおこすおそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。**
- 電池の+/-の向きを間違えないようにしてください。** →漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。
- 本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。** →故障の原因になります。

5. 電池を入れましょう


こんな機能があります

- 体動マーク** ……測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出したときに表示されます。
- 脈間隔変動マーク** ……測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。


6. 手首カフを巻きましょう

1 手首カフを広げます


手首カフをはがし、広げます。

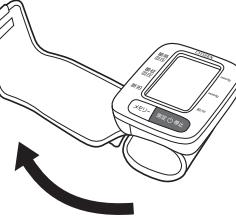


2 手首カフを左手首にかぶせます

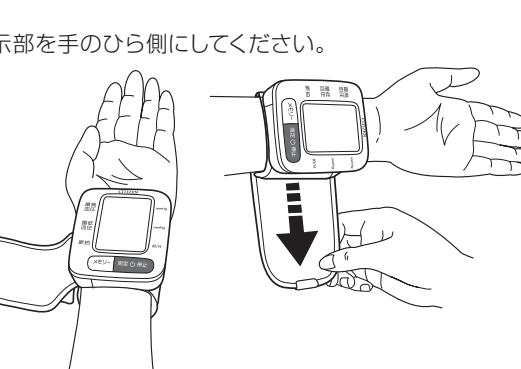

3 位置を確認します

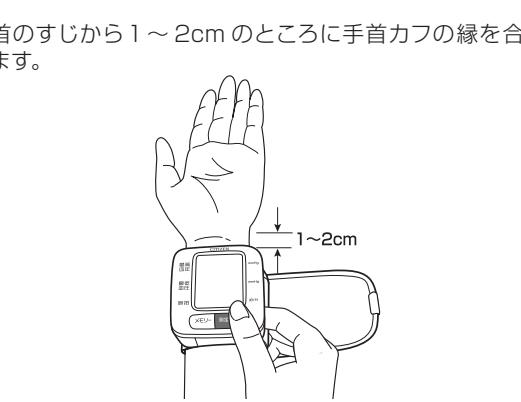

4 手首カフをぴったり巻きつけます

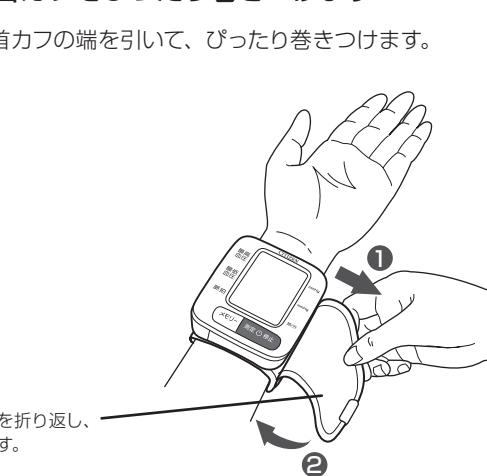


5. 電池を入れましょう


1 電池カバーを外します



2 電池を入れます

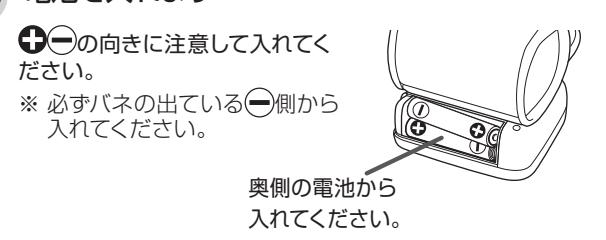


3 電池カバーを閉めます

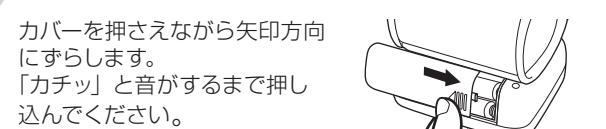


6. 手首カフを巻きましょう

電池カバーを外し、電池を取り出します。

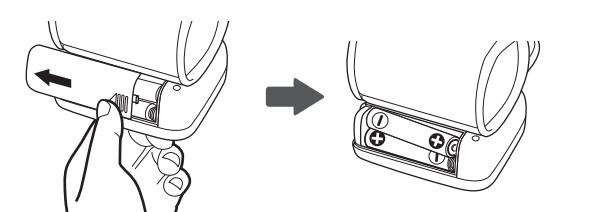

7. こんなときは電池を交換しましょう

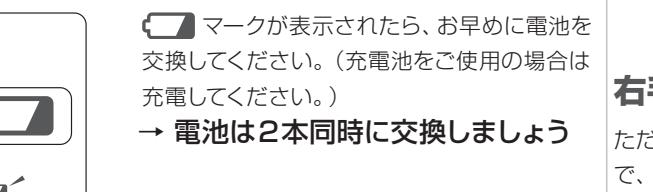

※ 電池を交換してもメモリーデータは保持されています。

- ※ 本製品にはモニター用電池(動作確認用電池)が付属されています。
- アルカリ電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
- ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。
- ※ ニッケル水素充電池は、エネルギーまたは充電式エボルタをご使用ください。

8. 測定しましょう

- 腕時計などを外しましょう。
上着のそでをまくり上げるときは、腕が圧迫されないようにしてください。
手首周囲が13.5cm未満の方、21.5cmを超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう




4 脚を組まないようにしましょう

9. 測定結果の呼び出しかた

1 測定 (停止) を押して測定を開始します


全点灯表示時の マークは、電池交換のお知らせではありません。

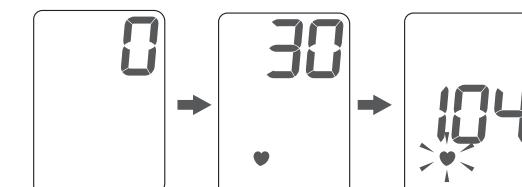

脈拍を感じると マークが点滅します。

※ 測定を止めるときは、 を押して停止してください。測定 (停止) を押しても空気が抜けない場合は、手首カフを外してください。


2 測定結果が表示されます

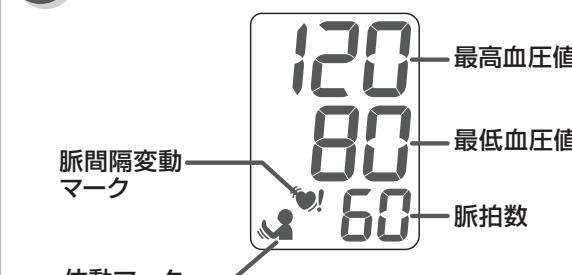

測定後、 を押して電源を切ります。

※ 測定後に電源を切り忘れても、約3分後に自動的に電源が切れます。


1 メモリーを1回押します

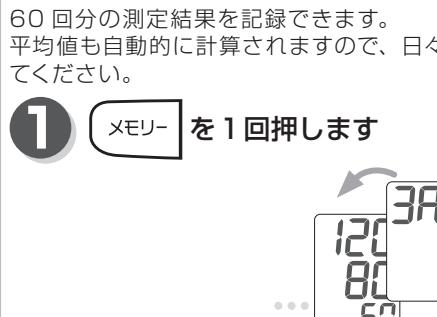

平均値を示す「3A」を表示したあと、最新3回分の平均値を表示します。

※ 3回以上の測定結果(体動マーク表示の測定結果は除く)がなければ平均値表示されません。

2 さらにメモリーを押すと、過去の測定結果を表示できます

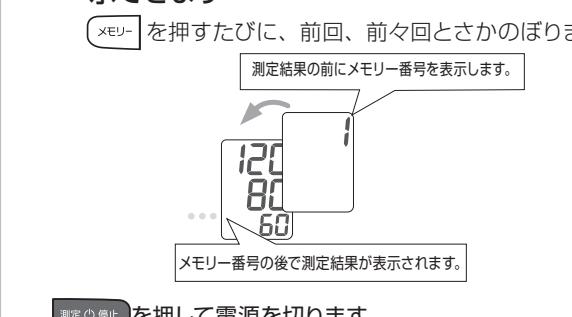

測定 (停止) を押して電源を切ります。

