


機械器具 16 体温計
管理医療機器 皮膚赤外線体温計 (JMDNコード：17888000)
シチズン額式体温計 HL710H

【警告】

- ・電池は乳幼児の手の届くところに置かないください。[誤飲のおそれがあります。]
- ・お子様だけで使わせないください。[けがをする可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 各部のなまえ

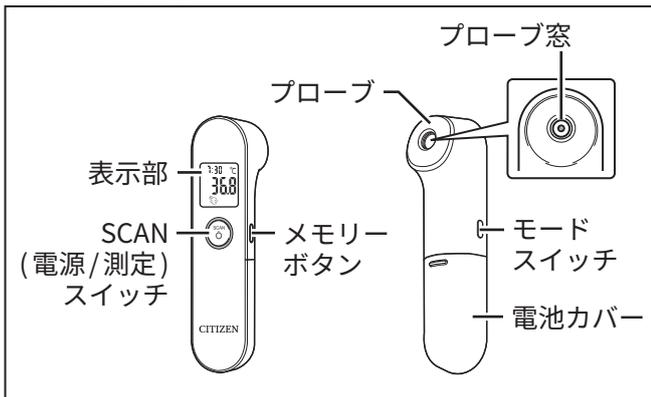

★付属品：単4形アルカリ乾電池2本（モニター用）、取扱説明書/保証書

2. 体に接触する部分の原材料

- ・本体：ABS樹脂

3. 本体の寸法および重量

- ・本体：約37（幅）×147（高）×34（奥行）mm
- ・質量：約68g（電池含まず）

4. 電気的定格

- ・電源：DC3V（単4形アルカリ乾電池×2本）
- ・分類：内部電源機器・ BF形装着部・IP22

5. 原理

本製品は、人の体温を測定するための装置であり、額から放射されている赤外線赤外線センサーが検知し、その赤外線量を舌下温度に換算して、結果を表示します。

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために使用します。


【使用方法等】

＜測定前準備＞

- (1) 電池カバーを開け、電池の「+」と「-」の向きに注意して電池を入れた後、電池カバーを閉めます。
- (2) プローブ窓が汚れている場合は、市販の綿棒でプローブ窓を乾拭きしてください。乾拭きで汚れが落ちない場合は、綿棒に消毒用アルコールを浸み込ませてから拭き取り、よく水気を拭き取ってからご使用ください。
- (3) 室温になじませてからご使用ください。

＜測定方法＞

- (1) SCAN(電源/測定)スイッチを押します。表示部とSCAN(電源/測定)スイッチ周囲のバックライトが約5秒間点灯します。

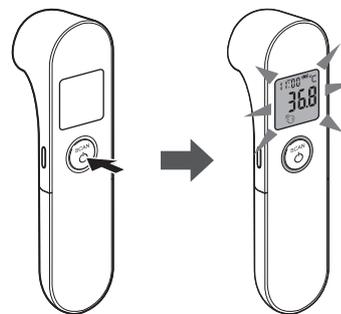


「ピッ」とブザーが鳴り、「」（額測定マーク）が表示されます。



- (2) プローブ窓を額中央に向け、プローブを額より1cm～3cm以内に近づけ、SCAN(電源/測定)スイッチを押します。

※ バックライトが約6秒間点灯します。

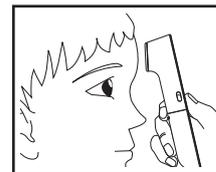

「ピー」とブザーが鳴ったら検温終了です。（測定時間：約1秒）測定結果を確認します。

※ 連続で測定する場合、プローブ窓を額中央に向け、再度SCAN(電源/測定)スイッチを押すと「---」が表示され、「ピー」とブザーが鳴ったら測定結果が表示されます。

- (3) 電源オフにしたいときは、表示部に「OFF」が表示されるまでSCAN(電源/測定)スイッチを約6秒間長押ししてください。
- ※ SCAN(電源/測定)スイッチを押さなくても、約1分後、自動的に電源がオフになります。

- (4) 使用後は、綿棒やアルコール綿で本体、プローブやプローブ窓の汚れを拭き取り、完全に乾かしてから保管してください。

高熱アラート

測定結果が37.5°C以上の場合、「ピッピッ」と連続でブザーが鳴ります。

その他の機能として、以下の機能があります。

・時計機能

日付、時刻の設定ができます。設定をすると、メモリーに測定結果と測定日時が保存されます。

・物体表面温度測定モード

液体や固体の表面温度を測ることができます。（例 水、ミルク等）

・物体表面温度連続測定モード

約3秒間隔で連続的に液体や固体の表面温度を測ることができます。

取扱説明書を必ずご参照ください

・室温測定モード

気温や部屋の温度を測ることができます。

<測定結果の呼び出しかた>

本製品は12回分の体温測定結果、測定日時を呼び出して確認できます。(額測定のみ)

- (1) メモリーボタンを押すと、メモリー番号と“(M)”(メモリーマーク)が表示されます。すぐあとに保存したメモリーが“(M)”と同時に表示されます。そのあいだ、“(M)”が点滅し、メモリーの測定日と測定時刻が交互に表示されます。



- (2) もう一度メモリーボタンを押すと、更に前回の測定結果を確認できます。
※ 約1分間操作をしないと電源がオフになります。

<測定結果の消去のしかた>

※個別の測定結果は消去できません。

- (1) メモリーボタンを押します。
- (2) モードスイッチを約3秒間長押しすると、“del”と表示されます。
- (3) もう一度モードスイッチを押すと“---”表示され保存した全測定結果の消去が完了します。



【使用上の注意】

- (1) 運動、入浴、食事のあとの約30分間は検温を避けてください。
- (2) 体温は、時間帯、気温、睡眠などの状態により常に変動しています。また、個人差、性別、年齢によっても異なります。日常的に体温を測定し、自分の平常時の検温値を知ることが大切です。
- (3) 額で測った体温とわきの下で測った体温では測定する部位が異なるため、測定結果が異なる場合があります。単純に比較せず、一定条件のもとで定期的に測定し、平常時の測定結果と比較してください。
- (4) お子様には、自分一人で測定させず、必ず、保護者が測定してください。けがの原因になります。
- (5) 表示部に“”が点滅または点灯したときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。ニッケル水素充電電池を使用している場合には、充電してください。
- (6) プローブ窓に直接手を触れないでください。測定結果の異常や故障の原因になります。
- (7) 修理、改造、分解は絶対におこなわないでください。
- (8) 超音波洗浄はしないでください。[故障の原因になります]
- (9) 本製品は防水構造ではありません。水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。
- (10) 曲げたり落としたり、強い衝撃を与えないでください。

※取扱説明書、医療機器添付文書(本紙)に従わない使用がなされた場合および勝手に何らかの修理、改造、分解、再調整がなされた場合について、弊社は一切の責任を負うことができませんのでご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温や直射日光が当たる場所、湿気が多い場所、ほこりが多い場所、腐食性ガスの発生する場所に保管しないでください。長期間使用しない場合は、電池を外してください。電池からの液漏れにより故障の原因になります。

2. 耐用期間

標準的な耐用期間の目安:5年[自己認証(当社データ)による]

※電池などの消耗品は除く。

※標準的な耐用期間を越えて使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) しばらく使用しなかったときは、使用前に清潔な状態にし、点検(電源が入るなど)してください。
- (2) シンナーやベンジン、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、クロロヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム等は絶対に使わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: シチズン・システムズ株式会社
製造元: HEALTH & LIFE CO., LTD. (台湾)

お問い合わせ先

シチズン・システムズ株式会社 お客様相談室
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
電話: 0120-88-6295