



電子添文

アプリ「添文ナビ」
でお読みください



(01)04562191602501

HXZ00443-00

取扱説明書

保証書付

シチズン振動体温計：わき専用予測式（30秒）＋実測式

CTEB720VA：振動体温計＋アタッチメント

CTEB718V：振動体温計

- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。
- 取扱説明書および電子化された医療機器添付文書に従わない使用がなされた場合および勝手に何らかの修理、改造、分解、再調整がなされた場合について、製造販売業者は一切の責任を負うことができませんのでご注意ください。
- 本製品は、測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する装置です。

この表示の欄は人が傷害を負ったり物的損害が想定される内容ですので、ご注意ください。

安全上のお願い

ご使用前に、必ずお読みください。

危険 人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危険が想定される場合

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 人が傷害を負ったり、物的損害*の発生する可能性が想定される場合

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

危険

電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
→誤飲のおそれがあります。

電池を飲み込んだ場合には、化学やけど、粘膜の貫通など、死に至ることがあり、直ちに取ります必要があるため、すぐに医師の指示に従ってください。

警告

検温結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

お子様だけで使わせしないでください。
→事故や故障の原因になります。

測温部（先端）をかまなしないでください。
→事故や故障の原因になります。

電池、電池カバーなどお子様が飲み込まないように充分注意してください。
誤って電池、電池カバーなどを飲み込んでしまった場合、あるいは飲み込んだおそれがある場合は、医師に連絡し、指示を受けてください。
→けがなどの原因になります。

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流して、医師の治療を受けてください。
→けがなどの原因になります。

本製品は電磁妨害（EMD）に関して、特別な注意が必要です。必ず、EMD技術資料に記載されたEMD情報にもとづいて、使用してください。
→携帯電話および移動無線周波（RF）通信機器により、影響を受けることがありますので、30cm以上離して使用してください。
→他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないでください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。
→事故や故障の原因になります。

注意

体温計を修理、改造、分解しないでください。
→事故や故障の原因になります。

測温部（先端）を持って振ったりしないでください。
→事故や故障の原因になります。

人の体温測定以外には使用しないでください。
→故障の原因になります。

強い静電気や電磁波、磁石などに近づけたりしないでください。
→誤作動をおこすおそれがあります。

高温や直射日光の当たるところ、湿気の多いところ、ほこりの多いところ、腐食性ガスが発生する場所などでの保管は避けてください。
→事故や故障の原因になります。

無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
→故障の原因となります。

電池の＋の向きを間違えないようにしてください。
→漏液、発熱、破裂などおこし、本体が破損する原因になります。

水中に放置しないでください。
→故障の原因となります。

本製品の仕様

販売名	シチズン振動体温計
型式	CTEB720VA、CTEB718V
種類	予測式 一般用 防曇形
分類	内部電源機器・BF形装着部
検温部位	わき下
定格および電源	DC 3.0 V ー（ー：直流）、CR2025 タイプ相当 1個
消費電力	7 mW
電池寿命	予測：約 3000 回 実測：約 1500 回
耐用期間	5年【自己認証（当社データ）による】
体温表示	数字 3桁＋℃、表示単位 0.1℃
最大許容誤差	± 0.1℃（恒温水槽で実測測定した場合）
測温範囲	32.0～42.0℃
質量	約 25.5 g（電池含む） 専用アタッチメント装着時 約 35 g
寸法	約 31.5 mm（幅）× 126.5 mm（長さ）× 15 mm（厚さ） アタッチメント装着時 約 35 mm（幅）× 128 mm（長さ）× 18 mm（厚さ）
防水性	IPX7、JIS T 1140：2024 による（防曇形）
付加機能	メモリー機能、電源自動 OFF、バックライト
使用環境	周囲温度：10～40℃ 相対湿度：30～85% RH
保管条件	周囲温度：－20～60℃ 相対湿度：95% RH 以下
付属品	収納ケース、モニター用電池（内蔵）、取扱説明書／保証書、専用アタッチメント「びたッチメント」（CTEB720VAのみ）

※電子化された医療機器添付文書および EMD 技術資料は弊社ホームページのダウンロード一覧をご覧ください。
https://www.citizen-systems.co.jp/health/support/download/
※本製品、および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※本製品は EMD 規格 IEC 60601-1-2：2014 + A1：2020 に適合しています。
※本製品は JIS T 1140：2024 に適合しています。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。
※IPX7 とは、IEC 60529 によって規定された水に対する保護を示しており、1 m の深さに 30 分間浸漬させても有害な影響を生じる量の水が製品内に侵入されないように保護されています。

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷。
- 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 火災、地震、水害その他の天災地変や、異常電圧、指定以外の電源、衝撃などによる故障または損傷。
- 保証書のご提示が無い場合。
- 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご使用後の外表面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品などの交換。
- ※お買い上げの販売店にご持参頂く場合の諸費用や弊社にご送付いただく場合の送料などは、お客様負担となります。
- 保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証書

CITIZEN

本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場合、本保証規定に従ってお買い上げ後1年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様に記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型式	CTEB720VA CTEB718V		
お客様お名前	様	TEL	- -
ご住所	〒		

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名および住所



保証期間 お買い上げ日より1年間

製造販売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

2501

各部のなまえ

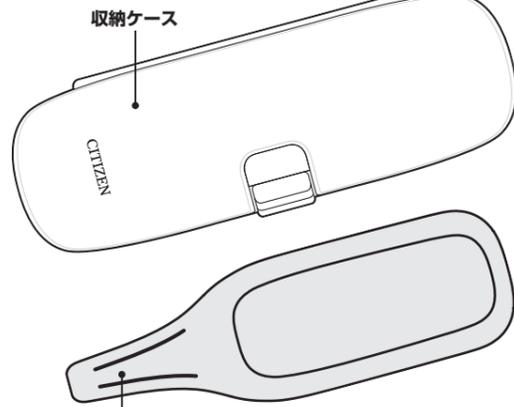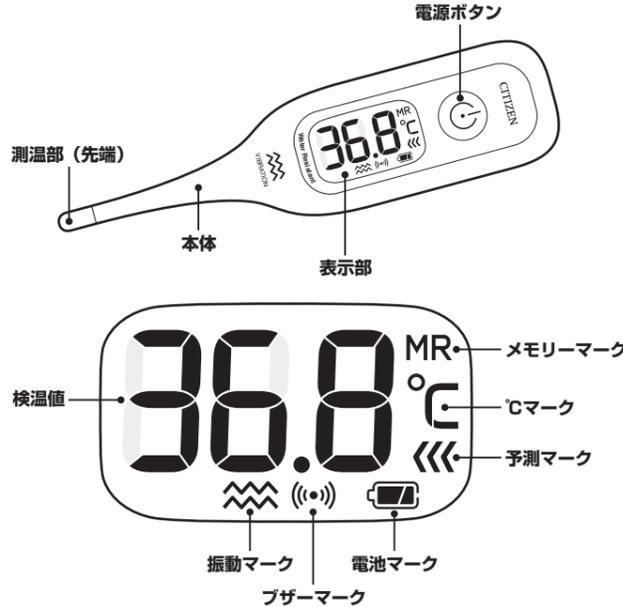

専用アタッチメント「びたッチメント」型番：AT-CT201
（CTEB720VAには専用アタッチメント「びたッチメント」が付属しています。CTEB718Vは専用アタッチメント「びたッチメント」が別売りです。お求めはお買い上げの販売店、または弊社お客様相談室までお問い合わせください。）

専用アタッチメント「びたッチメント」装着方法

体温計が測定中にズレたり、はさみづらい際には専用アタッチメント「びたッチメント」が便利です。よりわきにフィットし、ズレにくく安定した体温測定ができます。
①専用アタッチメント「びたッチメント」に、本体の測温部（先端）をスライドして入れます。
②本体上部に、専用アタッチメント「びたッチメント」をかぶせて装着します。
③体温計本体の裏側にあるプザー穴の位置を合わせます。



（CTEB718Vは専用アタッチメント「びたッチメント」が別売りです。）


体温計の正しいはさみかた



●専用アタッチメント「びたッチメント」装着時も同じようにはさんでください。


収納ケースの開けかた

CITIZENの文字がある面を表にして、ロック部を矢印の方向①に動かしてから、収納ケースのフタを矢印②の方向に開けてください。
※体温計が落ちないように注意してください。

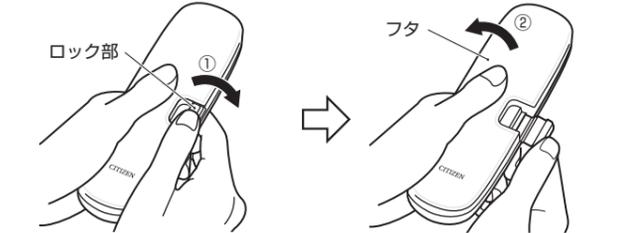

体温計の収納方法

体温計に専用アタッチメント「びたッチメント」を装着した状態で収納するときは、スペーサーを（CTEB718Vのみ）リブとスペーサーの間の梱包部を取り外してください。

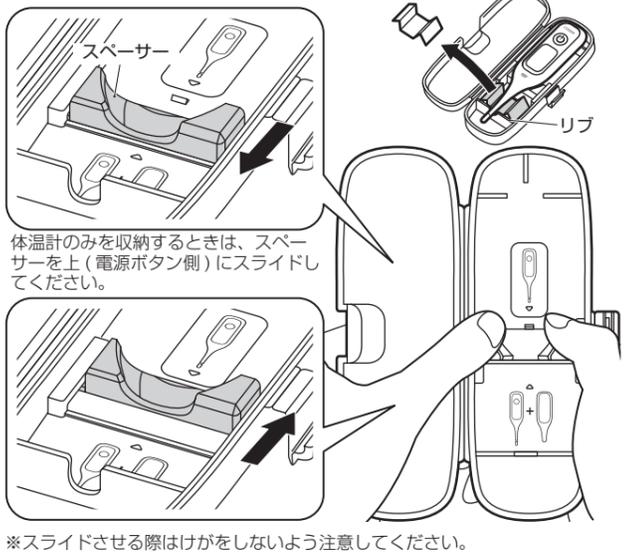

※スライドさせる際ははげをしないよう注意してください。

体温ワンポイントメモ

●いつもより検温値が高いとき

3～5分程度の実測検温値と比べていませんか？
予測検温値はわきを閉じてからわきの下が十分に温まる10分後の温度（平衡温）を予測して表示します。

●人の体温

大人の平熱は36.8℃程度で、幼児は大人より高めの体温と言われています。また、1日の中での体温の変動も大きくなっています。
ふだんの検温で平熱の範囲を確認しておきましょう。

●検温はわきの下の正しい位置で

検温値はわきのはさむ位置で異なりますので、常にわきの下の正しい位置で測定してください。（「体温計の正しいはさみかた」を参照してください。）

●平熱を知っておきましょう

平熱は個人差もあるのでふだんから検温を心がけ、元気なときの体温を知っておきましょう。

こんなときは正しく測れません


●入浴・運動・飲食直後など

入浴、運動、食事、お茶などのあとは体温が上がっています。約30分間は検温を避けてください。

●わき下以外での検温

本製品はわき専用です。わき下以外（口中など）では使用しないでください。

●正しい位置に入っていない場合

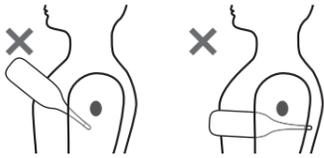

●汗をかいた状態

汗でぬれていると実際よりも低い体温を示すことがあります。汗をかいたままの検温は避けてください。測る前に、わきの下の汗を乾いたタオルなどで軽く拭き取ってください。

●起床直後

起床直後に動いた場合は、比較的激しく体温が上昇しますので、検温は避けてください。起床直後に検温する場合は、動き出す前の安静時が30分以上経ってから測定してください。


●検温中に動く

検温中に動くとき正しく測定できません。検温中は安静にしてください。

体温の測りかた

1 電源を入れます。

体温計を収納ケースから取り出し、電源ボタンを押します。バックライトが約4秒間点灯します。

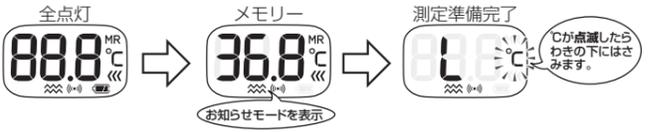

表示部が全点灯します。
※このとき表示する「C」は電池交換のお知らせではありません。

前回の測定値（メモリー）と、現在のお知らせモードを表示します。
※前回値が実測検温の場合は予測マーク「C」は表示しません。

※Lが表示しないときは、測温部（先端）が32℃以上になっている可能性があります。その場合は、測温部（先端）を水で冷やしてから、再度測定してください。

正しく測るために

●測る前に、わきの下の汗を乾いたタオルなどで軽く拭き取ってください。

2 わきの下にはさみ体温を測定します。

わきの下のくぼみの中心部に体温計の測温部（先端）があたるように、斜め下方向（30°）からはさんでわきをしっかりと閉じます。予測検温中は、予測マーク「C」を表示します。約30秒で予測検温が完了します。℃が点滅から点灯へ変わり、「C」ピポピポ（ブザー音）か、「C」ブルブル（振動）、またはその両方の合図で取り出します。



実測検温するとき

予測検温のあと、体温計を取り出さずに検温を続けます。検温開始から約3分後に実測表示に切り替わります。約10分後に「C」ピポピポ（ブザー音）か、「C」ブルブル（振動）、またはその両方の合図で取り出します。

※続けて検温する場合は、電源を切り1分以上放置してからご使用ください。
※冬季など体温計が冷えている場合、体温計を周囲温度になじませてから測定してください。
※低温環境で測定した場合、検温完了までの時間が長くなる場合があります。

3 電源を切り、本体を収納ケースに入れます。

電源ボタンを押して電源を切ります。バックライトが約1秒間点灯し、電源が切れます。
●電源を切り忘れても、検温開始から約20分後に自動的に電源が切れます。
※「体温計の収納方法」を参照してください。

▲測定ができないときは

故障と疑われる場合には、まず下記の項目について点検をお願いします。それでも正常に作動しないときは、保証規定をお読みの上、修理・サービスをお申しつけください。

こんなとき	点検するところ / 状態	直しかた
電源ボタンを押しても何も表示しない	電池が正しく入っていますか？ 電池が消耗していませんか？	「電池交換の方法と注意」を参照して、正しく入れなおしてください。 新しい電池に交換してください。
Er.1	●測温部（先端）がわきの下から外れていませんか？ ●測定前に体温計が低温環境に保管されていませんか？ ●測定中の周囲温度が低く、10℃未満ではありませんでしたか？	しばらく時間を置いて、使用環境（10～40℃）にて本取扱説明書の操作方法に従い、再度測定してください。
Er.2	●測定前の周囲温度が高くありませんか？ ●連続して測定していませんか？ ●℃が点滅する前にわきの下にはさんでいませんか？	測温部（先端）を水で冷やしてから、本取扱説明書の操作方法に従い、再度測定してください。
Er.3	センサー回路の断線などで計測回路に異常があった場合	弊社お客様相談室にご相談ください。

電池交換の方法と注意

電池交換の手順

- ①コインなどを電池カバーの溝に入れ、「◀ OPEN」の方向（反時計回り）に電池カバー側の○印と本体側の○印が合うまで（約130°）まわしてください。
- ②電池カバーが上がってきますので、手で取り外してください。
- ③古い電池を取り外してください。
- ④電池の⊕側を上にして新しい電池をセットしてください。
- ⑤電池カバー側の○印と本体側の○印を合わせて、カバーを上から押さえながらコインなどで「CLOSE ▶」の方向（時計回り）に元の位置までまわしてください。



電池交換の注意


- ▲電池および電池カバーなどはお子様がけがをしたり、飲み込まないように充分注意してください。
- 「C」が点滅したら、お早めに交換してください。Cが点灯すると、検温ができなくなります。
- 電池はCR2025です。なお、付属の電池はモニター用（機能確認用）ですので電池寿命が短い場合があります。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体で決められた廃棄方法に従って、正しく処分してください。
- 長期間使用しない場合、電池は取り外して保管してください。

お知らせモードの選びかた

検温完了のお知らせを、「振動＋ブザー音」、「振動のみ」、「ブザー音のみ」から選ぶことができます。

1 電源が切れている状態で、電源ボタンを2秒以上押し続けます。

電源ボタンを押し続けると、4秒ごとにお知らせモードが切り替わります。

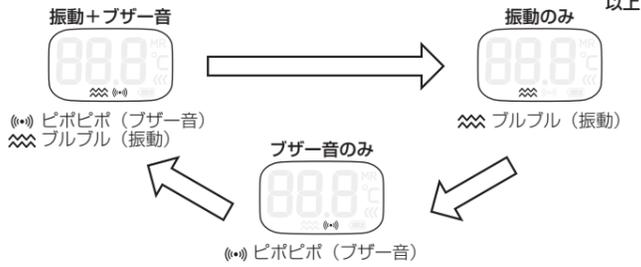

2 お好みのお知らせモードのときに電源ボタンを離します。

電源ボタンを離したときのモードに設定されます。
※初期および電池交換後は、「振動＋ブザー音」のモードの設定になっています。
※お知らせモードは最大3回切り替わります。3回切り替わると自動的に体温を測るモードになりますので、設定がお済みでない場合は再度①から操作し直してください。

▲お手入れ上の注意

- 測温部（先端）を消毒する場合には、消毒用アルコールを含ませたガーゼなどで軽く拭いてください。また、測温部（先端）を長時間アルコールに浸漬したり、熱湯（50℃を超えるお湯）で消毒しないでください。故障の原因になります。なお、表示部およびその周囲は、消毒用アルコールを含ませたガーゼなどで拭かないでください。表示部の曇りの原因になります。
- ご使用後は必ず清潔にして（水分をよく拭き取って）付属の収納ケースに保管してください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、クロルヘキシジン、グルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウムなどは絶対に使わないでください。変色、変質、変形や故障の原因になります。
- イソプロパノールやエタノールに長時間（およそ30分以上）浸漬させた場合、体温計が変形する可能性があります。
- 超音波洗浄はしないでください。故障の原因になります。
- 水洗いをおこなう場合は、洗面器などに貯めた水に体温計を浸してから、汚れを拭き取るようにしてください。本品は、IPX7およびJIS T 1140:2024に準じた防浸規格に適合しておりますが、本規格では流水などの高い水圧や、長時間の浸漬については保証されておりません。
- 専用アタッチメント「びたッチメント」は本体から取り外して、中性洗剤で洗いきれいな水ですすぎ、水分をよく拭き取ってください。

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、
分解せず、お買い上げの販売店または弊社
お客様相談室にお問合せください。

受付時間：10～17時
月～金（祝祭日、年末年始を除く）

シチズン・システムズ株式会社 **0120-88-6295**

お客様相談室

通話料金は無料です。

E-mail: support@systems.citizen.co.jp

https://csj.citizen.co.jp

CITIZEN、健康予約、びたッチメントはシチズン時計株式会社の登録商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

医療機器認証番号 301ADBZX00010000