

CITIZEN

Micro HumanTech

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL
MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN SANGUÍNEA

REF **CH-650**

Español



Español

0901

Contenidos

- 3 - OBSERVACIONES GENERALES
- 5 - PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO
- 10 - NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
- 12 - CÓMO INSTALAR LAS PILAS
- 13 - CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS
- 14 - CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA
- 16 - CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS
- 18 - CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL
- 20 - RECUPERACIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA
- 22 - INDICACIONES DE ERROR
- 23 - ACERCA DE LA "PRESIÓN SANGUÍNEA"
- 24 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA
- 25 - ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS
- 26 - ESPECIFICACIONES

Asegúrese de que tiene todos estos componentes



Monitor de presión sanguínea



Estuche de almacenamiento



(para el monitor)
2 pilas AAA



Manual de instrucciones

- Esp 2 -

OBSERVACIONES GENERALES

Observaciones generales sobre la presión sanguínea y la medición de la presión sanguínea

1. Para desinflar el brazalete rápidamente, presione el interruptor "START/STOP".
2. El brazalete incluido es apto para una circunferencia de muñeca de 13,5 a 21,5 cm.
3. Al colocar el manguito, el cuerpo del monitor de presión sanguínea debería ser colocado en la parte interior de su muñeca.
4. ¡La automedición no es una terapia! En ningún caso deberá usted cambiar la dosis de medicamentos recetada por su médico.
5. Como preparación para la medición de la presión sanguínea, es aconsejable que orine y después permanezca relativamente quieto durante los 10 ó 15 minutos previos a la medición.
6. Hacer ejercicio, comer, beber, fumar, etc., antes de la medición puede afectar los resultados.
7. La presión sanguínea varía constantemente a lo largo del día. La medición de la presión sanguínea deberá efectuarse regularmente a la misma hora cada día.
8. NO se impresione demasiado por los resultados de una sola medición. Mantenga un registro de las variaciones de la presión sanguínea. Una imagen completa solamente puede obtenerse luego de una gran cantidad de lecturas.
9. El estrés emocional suele causar una elevación de la presión sanguínea.

Para una correcta medición de la presión sanguínea


1. Respire profundamente cinco o seis veces y seguidamente relájese antes de medir la presión sanguínea. Si se encuentra tenso durante la medición de la presión sanguínea, no conseguirá una lectura válida.
2. La presión sanguínea se elevará si se encuentra en una situación de preocupación o de enfado, de falta de sueño o estreñimiento, o después del ejercicio o una comida.
3. Envuelva el manguito alrededor de su muñeca cómodamente ( ver pág. 14).
4. NO mida la presión sanguínea después de bañarse o beber.
5. Cuando sienta necesidad de orinar, hágalo antes de medir su presión sanguínea.

- Esp 3 -

Español

OBSERVACIONES GENERALES

6. Mida su presión sanguínea cuando la temperatura de la habitación esté alrededor de los 20°C. NO mida su presión sanguínea cuando haga demasiado frío (por debajo de 10°C) o demasiado calor (por encima de 40°C) en la habitación.
7. NO intente medir su presión sanguínea inmediatamente después de beber café o té o de fumar.
8. Mida la presión sanguínea cuando esté tranquilo y relajado. Mantenga el centro del brazalete a la altura de su corazón y NO mueva el brazo o hable.
9. NO mida la presión sanguínea después que el brazalete haya estado en su muñeca durante unos minutos. Durante ese tiempo, su muñeca habrá desarrollado una presión sanguínea mayor y no obtendrá una lectura válida.
10. Si se visualiza el Indicador de Movimiento del Cuerpo o el Indicador de Latido Irregular (IHB), relájese y mida nuevamente su presión arterial. Si el Indicador de Latido Irregular (IHB) aparece frecuentemente, se le recomienda que consulte con un médico acerca de su estado de salud. (Vea la página 19)
11. La siguiente ilustración muestra la clasificación de la presión sanguínea de acuerdo con las normas de la OMS.

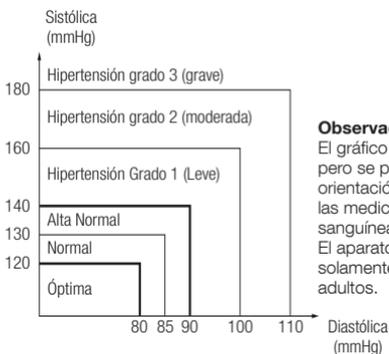**Observaciones:**

El gráfico no es exacto, pero se puede utilizar como orientación para comprender las mediciones de presión sanguínea no invasivas. El aparato está destinado solamente para uso con adultos.

Definiciones y clasificaciones de los niveles de presión sanguínea

- Esp 4 -

OBSERVACIONES GENERALES

Mida su presión sanguínea a la misma hora cada día.

- * La presión sanguínea cambia a cada momento. Esto significa que los datos recogidos durante un largo periodo de tiempo tienen una mayor significación que los datos de una única medición. Por esta razón, debe medir la presión sanguínea diariamente. Idealmente, debería medir su presión sanguínea a la misma hora cada día siempre que sea posible.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

Precauciones para el uso

1. Si sufre de enfermedad cardíaca, presión sanguínea alta u otra enfermedad circulatoria, antes de utilizar el monitor, consulte con su médico.
2. Si siente una presión anormal de la muñequera o cualquier otra irregularidad durante el uso del dispositivo, reduzca la presión apagándolo inmediatamente o quitando las pilas y consulte en el establecimiento donde adquirió el aparato.
3. Si piensa que el valor medido es anormal o si la medición le hace sentirse indispuesto, interrumpa el uso y consulte con su médico.
4. La medición de la presión sanguínea puede no ser posible en alguien con un pulso débil o arritmia.
5. Si la presión sanguínea se mide repetidamente, en algunas personas puede causar problemas como congestión o hinchazón.
6. Las repeticiones frecuentes de las mediciones de la presión sanguínea no darán resultados precisos. Deje un intervalo de 1 minuto entre las mediciones.
7. Consulte a su médico antes de usar el monitor si sufre usted de una alteración severa de la circulación sanguínea en los brazos. El no hacerlo puede conllevar riesgo para la salud.
8. La medición puede no ser posible en alguien con un flujo sanguíneo insuficiente en el área donde se harán las mediciones o que sufre de frecuentes latidos irregulares. Consulte con su médico para consejo sobre si usar o no el monitor.
9. NO envuelva el brazalete alrededor de una muñeca herida.
10. NO envuelva el brazalete alrededor de una muñeca en el que haya sido colocado un gotero (infusión intravenosa) o que esté siendo

Español

- Esp 5 -

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

usada para transfusión sanguínea como parte de un tratamiento médico. El hacerlo puede causar heridas o un accidente grave.

11. NO opere en la vecindad de gases inflamables como los utilizados para anestesia. Hacer esto podría encender los gases y causar una explosión.
12. NO utilice el monitor en ambientes de oxígeno enriquecido, como en una cámara hiperbárica de hospital o una tienda de oxígeno. Hacer esto podría encender el oxígeno y causar un incendio.
13. NO use un teléfono móvil cerca del monitor porque esto podría causar mal funcionamiento.
14. Si usa un marcapasos cardíaco, consulte con su médico antes de usar el monitor.
15. Asegúrese de utilizar esta unidad solamente para la medición de la presión sanguínea. NO la utilice para ningún otro propósito.
16. NO utilice esta unidad en niños.
17. Es posible que no se pueda realizar la medición de la presión sanguínea en personas con arritmias frecuentes tales como latidos auriculares o ventriculares prematuros o fibrilación auricular.

Precauciones para el mantenimiento

1. NO almacene el monitor de presión sanguínea donde vaya a estar expuesto a la luz directa del sol, temperaturas elevadas (por encima de 60°C), temperaturas bajas (por debajo de -20°C), humedad relativa elevada (por encima de 95%) o en un sitio polvoriento.
2. NO deje caer o exponga el monitor de presión sanguínea a impactos o vibración.
3. Quite las pilas cuando el monitor no se vaya a utilizar durante un periodo largo.
4. NO intente desarmar el monitor.
5. NO doble excesivamente el brazalete.
6. Cuando el monitor esté muy sucio, límpielo con un paño humedecido con alcohol esterilizado o un detergente neutro. Límpielo después con un paño seco.
7. NUNCA limpie el monitor de presión sanguínea con disolvente o benceno porque esto podría dañar el monitor.

- Esp 6 -

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

8. Para limpiar el brazalete, límpielo con un paño húmedo. Evite frotar con fuerza ya que esto puede causar fugas de aire.

Explicación de los símbolos

 ₀₀₈₆: La marca CE pretende proporcionar información a los inspectores de mercado de los países miembros de la UE.

 : Parte aplicada tipo B

 : Consultar el manual de instrucciones antes del uso

 : Directiva WEEE de cumplimiento del dispositivo

 : Acumuladores y pilas para recogida por separado



: Fabricante

Advertencia

El dispositivo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con EN60601-1-2 para EMC. Esto no garantiza de ninguna forma que el dispositivo no estará afectado por interferencia electromagnética. Evite utilizar el dispositivo en un entorno altamente electromagnético.

Español

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

Naturaleza y frecuencia del mantenimiento:

Este producto está diseñado para su uso durante un largo período de tiempo; sin embargo, es generalmente recomendado que sea inspeccionado cada dos años para asegurar su funcionamiento y rendimiento correctos.

Protección del medioambiente:

Al deshacerse de la pila y del producto al final de su vida útil contribuya a proteger el medioambiente respetando las correspondientes regulaciones nacionales y locales sobre reciclado.

MARCO DE RAEE

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.



Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de pilas usadas.

El símbolo de esta hoja informativa significa que las pilas usadas no se deben mezclar con los desechos domésticos generales.

Para llevar a cabo un tratamiento, una recuperación y un reciclado adecuado de las pilas usadas, llévalas a los puntos de recogida correspondientes.

Para obtener más información sobre la recogida y el reciclado de pilas, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos local o el punto de venta donde adquirió los artículos.



Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea.

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar pilas usadas, póngase en contacto con las autoridades locales o pregunte cuál es el método de eliminación adecuado.

Nota sobre el símbolo de pila

El símbolo se puede usar en combinación con un símbolo químico. En este caso, cumple los requisitos establecidos por la Directiva de la sustancia química en cuestión.

Calibración:

Se recomienda inspeccionar el monitor de equipo de medición de presión sanguínea cada dos años para garantizar su correcto funcionamiento y precisión. Contacte con un distribuidor.

Español

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO



Nombre : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.
Dirección : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,
Tokyo 188-8511, Japan

Representante europeo:

Nombre : WW elektronische Geräte Vertrieb GmbH
Dirección : Fintelmannstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

- Para obtener datos técnicos, póngase en contacto con nuestro representante europeo.

CE 0086

Español

- Esp 9 -

NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

Nombres de los componentes

<Unidad principal>

Español



- Esp 10 -

NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

<Pantalla>





Español

CÓMO INSTALAR LAS PILAS

(Las pilas incluidas con el aparato deben introducirse en su compartimiento antes de poner el esfigmomanómetro en uso.)

1 Abrir la tapa del compartimiento de las pilas.

Español

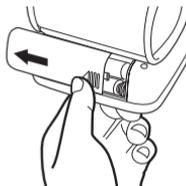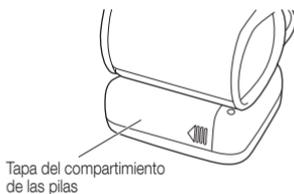

Presionando la tapa del compartimiento de las pilas, deslice la tapa hacia fuera en la dirección de la flecha.

2 Colocar las pilas en el compartimiento de las pilas.

Colocar las pilas siguiendo las indicaciones de los símbolos \oplus y \ominus .


* La pila entra primero con el lado negativo \ominus .



CÓMO INSTALAR LAS PILAS

3 Cerrar la tapa del compartimento de las pilas.


Deslice la tapa en la dirección de la flecha. Empuje la tapa hasta que se encaje.

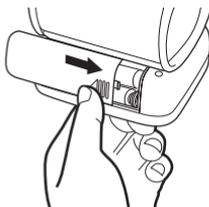

CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

Español

- Cuando se visualiza el icono  o cuando no aparece nada en la pantalla, reemplazar las pilas por dos pilas nuevas. Cambiar las dos pilas al mismo tiempo.
- Utilice siempre pilas alcalinas.
- No utilice pilas recargables.
- No utilice pilas alcalinas (LR03) y de manganeso (R03) juntas.
- Las pilas incluidas son tan sólo para demostración. La vida de la pila podría ser menor de lo especificado.
- Cuando deseche pilas usadas, cumpla las normativas estatales o las normas de la institución pública medioambiental aplicables en su país/área.

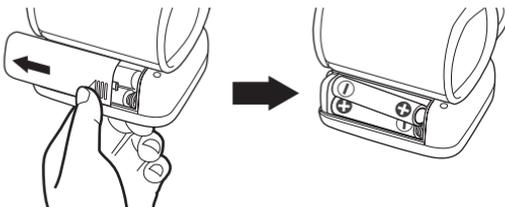

- Esp 13 -

CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA


Envuelva la muñequera alrededor de su muñeca correctamente. Una envoltura incorrecta podría repercutir en errores de medida.

- 1 Abra la muñequera.**
- 2 Envuelva la muñequera alrededor de su muñeca izquierda de manera que el monitor esté posicionado en la parte interior de su muñeca.**

- Coloque la muñequera sobre piel desnuda.
- La muñequera está diseñada para ajustarse a muñecas de 13,5 a 21,5 cm de circunferencia.




- 3 Holgadamente ajuste la muñequera tirando del extremo de la misma.**

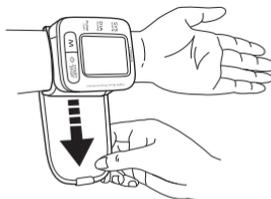

Español

CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA

- 4** Posicione el borde superior de la muñequera aproximadamente de 1 a 2 cm de distancia del pliegue de su muñeca.

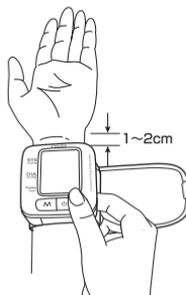

- 5** Ajuste la muñequera con el velcro.

- Si la muñequera está colocada demasiado holgada o demasiado tirante, podría resultar en errores o lecturas incorrectas.



Puede usar su muñeca derecha para medir su presión sanguínea.

Sin embargo, puede que la presión sanguínea difiera aproximadamente 10 mmHg dependiendo si se mide en la muñeca izquierda o derecha y, por lo tanto, idealmente se debe medir la presión sanguínea siempre en la misma muñeca.

Para obtener mediciones precisas

- Un brazalete muy flojo o muy apretado puede impedir la medición correcta.
- Siéntese derecho mientras toma la medición.

- Esp 15 -

Español


CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS

La presión sanguínea varía con su postura, la hora del día y una gama de factores. Idealmente, debe medir su presión sanguínea a la misma hora cada día en la misma postura.

- 1 Asegúrese de que su postura esté correcta. Siéntese derecho, respire profundamente y relaje.

- 2 Coloque la palma de la mano hacia arriba y deje los dedos relajados.

- 3 Es importante colocar el brazalete al nivel del corazón.

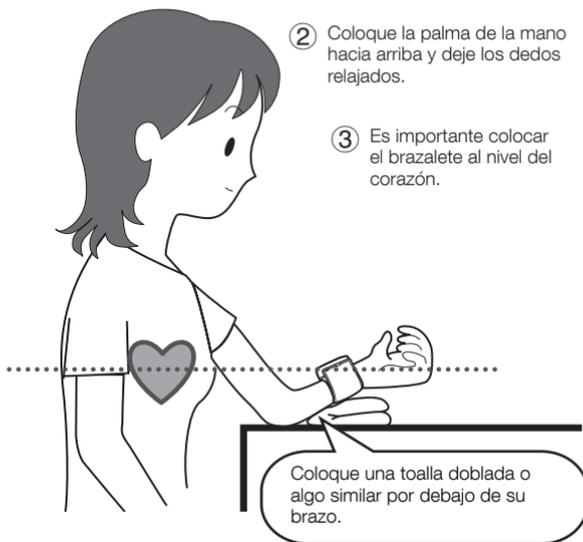

Español

CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS

Para obtener mediciones correctas



- No su apriete el puño con fuerza.



- Envuelva el brazalete sin dejarlo muy flojo.



- No cambie la posición del monitor.





- No mueva el cuerpo ni hable durante la medición.

Español

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

- 1 Coloque la muñequera alrededor de su muñeca izquierda.**
( Ver página 14 "CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA".)
- 2 Asegúrese de que su postura es correcta.**
( Ver página 16 "CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS".)
- 3 Pulse el interruptor "START/STOP" para iniciar la medición.**

Español

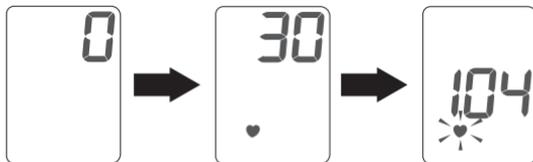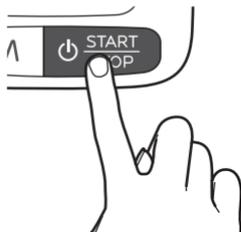

Se visualiza  cuando se detecta el pulso.

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

4 Se visualizan los resultados de la medición.



Español



El indicador de movimiento del cuerpo aparece en la visualización de los resultados de la medición si mueve su mano o muñeca durante la medición, lo que causa un cambio sustancial de la presión a detectarse.

- Si se visualiza el indicador de movimiento del cuerpo, mida de nuevo la presión sanguínea.



Si se detecta un latido irregular durante la medición, el indicador de latido irregular (IHB) aparece una vez que se concluya la medición.

- Puede que la medición no sea correcta si su pulso fluctúa grandemente durante la medición. Si se visualiza el indicador de latido irregular (IHB), mida de nuevo la presión sanguínea.



Precaución

Si el indicador de latido irregular (IHB) aparece con frecuencia, se recomienda que consulte un médico sobre su condición de salud.

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

5 Terminando la medición.

- Pulsar "START/STOP" para apagar el monitor.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

- Después de tomar la medición de la presión arterial, pulsando el interruptor "START/STOP" se apagará el monitor. Sin embargo, si no pulsa el interruptor, la función de apagado automático del monitor apagará automáticamente el monitor después de 3 minutos.


Español

RECUPERACIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA

60 resultados de medición pueden almacenarse en la memoria. El valor promedio se calcula automáticamente para ayudarle a administrar su salud diaria.

CÓMO RECUPERAR LOS DATOS

1 Presione el interruptor "MEMORY".

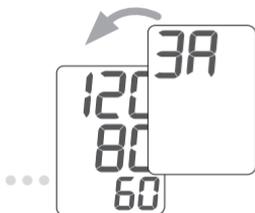

- En la parte izquierda de la pantalla aparece "3A" indicando el valor medio. Luego se muestra el valor medio de las tres últimas mediciones ("3A" y el valor medio no aparecen si hay menos de dos mediciones almacenadas en la memoria).

- Esp 20 -

INDICACIONES DE ERROR

Español


SEÑAL DE VISUALIZACIÓN	CONDICIÓN/CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA
	Aparece cuando la muñequera está colocada demasiado holgadamente.	Recoloque la muñequera cómodamente. Tome otra lectura, asegurándose de que permanece quieto. ( Ver página 14 "CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA".)
	Aparece cuando su muñeca se ha movido durante la toma, o aparece cuando el manguito no está colocado correctamente.	Recoloque la muñequera correctamente. Tome otra lectura asegurándose de permanecer perfectamente quieto. ( ver página 14 "CÓMO COLOCAR LA MUÑEQUERA".)
	Aparece cuando las pilas se han agotado.	Reemplace las dos pilas alcalinas por unas nuevas. ( Ver página 13 "CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS".)
	Aparece cuando el ritmo de pulsaciones está fuera del rango de medida (por debajo de 39 latidos/min. o por encima de 181 latidos/min.)	Recoloque la muñequera correctamente. Inspire varias veces profundamente para relajarse, y mida de nuevo. ( Ver página 16 "CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS".)
	La unidad no funciona correctamente.	Contacte con la tienda donde fue comprada o con su centro local de servicio. ( Ver página 25 "ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS".)

- Esp 22 -

ACERCA DE LA “PRESIÓN SANGUÍNEA”

¿Qué es la presión sanguínea?

El corazón es una bomba que impulsa la sangre por todo su cuerpo. La sangre es bombeada a presión constante desde el corazón a las arterias. A esta presión se le llama la presión sanguínea arterial, y representa, en términos generales, su presión sanguínea. La presión sanguínea está indicada por diferentes tipos de presiones, entre ellas la presión sistólica que ocurre cuando el corazón bombea sangre, y la presión diastólica que ocurre cuando la sangre regresa al corazón.

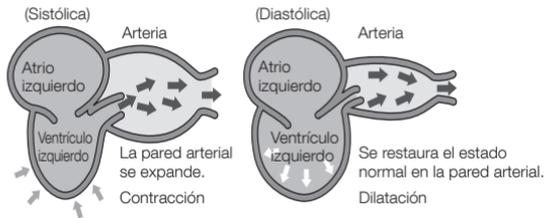


Español

La presión arterial varía a toda hora.

Su presión sanguínea cambia con su edad, sexo y una gama de otros factores. Es probable que resulte afectada por su biorritmo durante el día y por su postura, actividades físicas, actividades intelectuales, el nivel de estrés e incluso por la temperatura atmosférica. La presión sanguínea de una persona saludable generalmente varía a lo largo de un día.

[Ejemplo de las variaciones de la presión sanguínea durante un día]

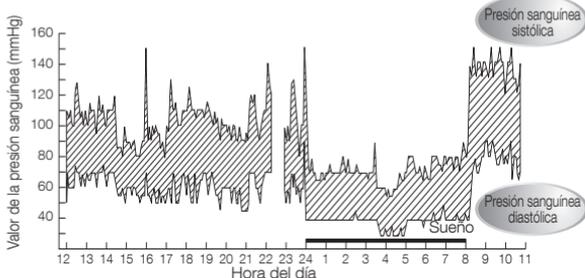

(Valores de presión sanguínea medidos en intervalos de cinco minutos durante un día)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

- Esp 23 -

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA

- P** ¿Por qué la medición de la presión sanguínea en casa es diferente de la medida por el médico o en un hospital?
- R** La presión sanguínea puede variar con el ejercicio, la temperatura ambiental o su estado de ánimo. Cuando un médico o enfermera toma su presión sanguínea, el valor de la presión probablemente será 10 o 20 mmHg más alto de lo normal, debido a la preocupación y al estrés. Sabiendo qué es lo que afecta a su presión sanguínea le ayudará a la mejor monitorización su salud.
- P** ¿Por qué los resultados de la medición de la presión arterial varían con cada medición?
- R** Nuestra presión arterial la ajusta un nervio automáticamente. La presión arterial difiere con cada latido del corazón. Pensamos que nuestra presión arterial es constante pero se puede ver como varía al realizar varias mediciones seguidas. La presión arterial es diferente a diferentes horas del día, tales como la mañana y la tarde, en diferentes estaciones y en diferentes temperaturas atmosféricas. Además, la presión arterial se ve fácilmente afectada por el estrés o los cambios emocionales. Tiende a aumentar cuando se siente tensión y a disminuir cuando se está relajado.
- P** ¿Cuál es el beneficio de medir la presión sanguínea en casa?
- R** La medición de la presión sanguínea en casa es fiable puesto que puede ser realizada en una situación estable y relajada. Los doctores dan mucha importancia a las mediciones de presión sanguínea tomadas en casa. Se recomienda medir su presión sanguínea a la misma hora cada día y guardar las variaciones de su presión sanguínea.

Español



Siempre consulte con su médico para la interpretación de las lecturas de su presión sanguínea, y para determinar el tratamiento correcto.

- Esp 24 -

ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS





Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de enviar su monitor de presión sanguínea a ser probado o reparado.



Problema	Comprobaciones	Respuesta
La pantalla no muestra nada aunque pulse el interruptor "START/STOP".	Compruebe si las pilas están agotadas.	Cambie todas las pilas por unas nuevas.
	Compruebe si las pilas están correctamente instaladas (⊕ y ⊖ en la posición correcta).	Instale las pilas en la dirección correcta.
No se puede medir.	Compruebe si ha  aparecido el icono.	Coloque el brazalete correctamente.
	Compruebe si el brazalete está colocado correctamente.	
	¿Permaneció tranquilo durante la medición?	Vuelva a medir su presión sanguínea, asegurándose de no moverse.
	Tenga en cuenta que la medición de la presión sanguínea pudiera no ser posible para alguien con un pulso extremadamente débil o arritmia cardíaca (pulsos irregulares).	
Sus lecturas de presión sanguínea son anormalmente altas o bajas respecto a las medidas en el hospital.		 Vea la página 24.
Otros fenómenos		Retirar las pilas del aparato y colocarle otras nuevas.

Español

ESPECIFICACIONES

Número de modelo		CH-650
Sistema de medición		Método oscilométrico
Pantalla		Tipo de pantalla digital
Gama de circunferencia de muñeca		13,5 a 21,5 cm
Gama de medición	Presión	0 a 280 mmHg
	Pulso	40 a 180 pulsaciones/min
Accuracy	Pressure	±3 mmHg
	Pulso	±5% de la lectura
Inflado		Inflado automático mediante bomba interna
Voltaje nominal		3V DC --- (--- : Corriente Directa)
Escape		Válvula electromagnética de escape rápido
Fuente de alimentación		2 pilas AAA (LR03)
Duración de las pilas		Aprox. 400 veces (180 mmHg, una vez al día, 22°C)
Condiciones de operación	Temperatura	10°C a 40°C
	Humedad	30% a 85% RH
Storage conditions	Temperatura	-20°C a 60°C
	Humedad	10% a 95% RH
Función de memoria		Hasta 60 medidas
Protección contra descarga eléctrica		Unidad de alimentación interna
Clasificación de seguridad		⚡ Equipo Tipo B
Modo de funcionamiento		Funcionamiento continuo
Protección contra el ingreso de agua		IPX0
Dimensiones		65(A _n) x 74(A _l) x 29(P _r) mm
Peso		Aproximadamente 103g excluyendo pilas
Accesorios		Juego compuesto por 2 pilas AAA (LR03) para el monitor, manual de instrucciones, estuche de almacenamiento

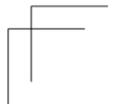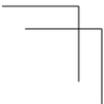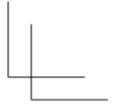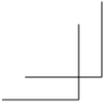

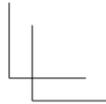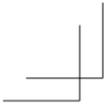

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
- “CITIZEN”和“西铁城”是日本法人西铁城控股株式会社の注册商标
- Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp
<http://www.citizen-systems.co.jp/>

