


Gebruikershandleiding voor DIGITALE THERMOMETER

ONDERDEELNAMEN

REF CTA301 Standaardmodel
REF CTA302 Waterbestendig (IPX5) model
REF CTA303 Waterbestendig (IPX5) en antibacterieel model

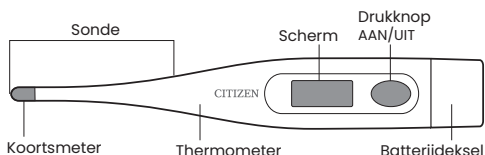

Antibacteriële thermometer

De Citizen digitale thermometer CTA303 voldoet volledig aan de internationaal erkende norm ISO22196. De thermometer bevat bepaalde speciale materialen, die hem antibacterieel maken.

Nederlands

WAARSCHUWINGEN

- De thermometer mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Niet lopen, hardlopen of praten terwijl de temperatuur wordt gemeten.
- Het product in de beschermhoes bewaren als het niet gebruikt wordt.
- Het product niet bewaren op een plek waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, stof of vocht. Extreme temperaturen vermijden.
- De thermometer niet laten vallen en niet blootstellen aan sterke schokken.
- Niet proberen om het product uit elkaar te halen en het alleen openen om de batterij te vervangen.

VAN °C NAAR °F (VAN °F NAAR °C) SCHAKELEN

Houd de AAN/UIT-knop 2 seconden ingedrukt. Het scherm wordt geactiveerd en °C verandert in °F.

GEBRUIK

- Druk op de AAN/UIT-knop om de thermometer te activeren. Er klinkt een piepje en het scherm licht op.
- Vervolgens wordt in de rechterhoek de laatst gemeten temperatuur met de letter 'M' weergegeven.
- Daarna wordt 37,0 °C (of 98,6 °F) weergegeven.
- Wanneer **Lo** en een knipperende °C (°F) worden weergegeven, is de thermometer klaar om de temperatuur te meten. Maar als de kamertemperatuur hoger is dan 32,0 °C (89,6 °F), wordt de kamertemperatuur weergegeven in plaats van **Lo**.
- Er klinkt een piepje wanneer de temperatuurmeting is voltooid.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de thermometer uit te schakelen.

(Na gebruikt wordt de thermometer na ongeveer negen minuten automatisch uitgeschakeld.)

A. De temperatuur in de mond meten

Plaats de tip van de sonde onder de tong en doe uw mond dicht. Meetduur bij benadering: 1 minuut.

B. De temperatuur in de oksel meten (onder de arm)

Veeg de oksel met een droge doek schoon en plaats de tip van de sonde onder de oksel, zodat de tip de huid raakt met de thermometer loodrecht op het lichaam. Plaats uw arm over uw borst, zodat de tip van de sonde goed door uw arm bedekt wordt.

Meetduur bij benadering: 2-3 minuten.

Opmerking: De temperatuur in de oksel is doorgaans 0,5 °C (1,0 °F) lager dan de in de mond gemeten temperatuur.


C. De temperatuur in het rectum meten

Breng een glijmiddel op waterbasis aan de op hoes van de sonde. Steek de sonde voorzichtig in het rectum.

Meetduur bij benadering: 1 minuut.

Opmerking: De temperatuur in het rectum is doorgaans 0,5 °C (1,0 °F) hoger dan de in de mond gemeten temperatuur.


SPECIFICATIES

Meetbereik	32,0 °C tot 42,9 °C (90,0 °F tot 109,9 °F)
Lage temperatuur	Temperatuur: <32,0 °C (90,0 °F) Scherm toont: Lo °C (Lo °F)
Hoge temperatuur	Temperatuur: ≥43,0 °C (109,9 °F) Scherm toont: Hi °C (Hi °F)
Schermresolutie	0,1 °C (0,1 °F)
Nauwkeurigheid	35,5 °C tot 42,0 °C ±0,1 °C (95,9 °F tot 107,6 °F ±0,2 °F) overig bereik: ±0,2 °C (0,3 °F)
Piepsignaal 'Kooorts' [≥37,8 °C (100,0 °F)]	30 korte piepjes in 10 seconden
Piepsignaal 'Normaal' [<37,8 °C (100,0 °F)]	10 lange piepjes in 10 seconden
Automatisch uitschakelen	10 minuten ± 2 minuten
Batterij	LR41 of SR41 (1,5 V)
Gebruiksduur batterij	2 jaar
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 10 °C tot 40 °C (50,0 °F tot 104,0 °F) Luchtvochtigheid: 30% tot 85% RV
Opslagomstandigheden	Temperatuur: -10 °C tot 60 °C (14 °F tot 140,0 °F) Luchtvochtigheid: 25% tot 90% RV
Beschermingsgraad	 Toegepast onderdeel Type BF

REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinig de thermometer voor en na elk gebruik met een zachte doek en isopropylalcohol verdund met water, of was met KOUDE water en zeep. Niet lange tijd laten weken en niet steriliseren door te koken of met gas- of stoomautoclaven.

BATTERIJ VERVANGEN

De batterij in de digitale thermometer moet worden vervangen wanneer rechtsonder in het scherm "  " wordt weergegeven. Vervang de batterij door een 1,5 V, LR41 of SR41 of een soortgelijke batterij.

De batterij vervangen

- Trek het batterijdeksel van de thermometer.
- Gebruik een niet-metalen spits voorwerp om de batterij te verwijderen en plaats de nieuwe batterij met de positieve (+) zijde naar boven gericht.
- Schuif het batterijdeksel voorzichtig weer op zijn plaats.

Opmerking: Verwijder de batterij op juiste wijze en houd hem uit de buurt van kinderen en hitte.

